

# Esthetic White & New Shades *CZR* *CRABIEN* *CRABIEN* *PRESS*

Белее, чем стандартная расцветка - для превосходной улыбки

## Esthetic White Shades



### СРАВНЕНИЕ EW РАСЦВЕТКИ И NW РАСЦВЕТКИ

	Степень опакowości	Цвет
EW00	в 4 раза выше, чем NW0	Белый
EW0	в 2 раза выше, чем NW0	
EW	так же, как NW0	Слегка желтоватый оттенок
EWY	так же, как NW0	



■ Esthetic White Shade Guide



■ Noritake Shade Guide

## ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

	EW00	EW0	EW	EWY
KATANA Zirconia	KT10			KT15
Shade Base /Shade Base Stain	SB White / SS White (if necessary) ※			SBB1 / SSB1
Body /Press Ingot	EW00B / EW00	EW0B / EW0	EWB / EW	EWYB / EWY
Enamel	Silky E1		Silky E2	
Luster Translucent	ELT2		ELT1	
External Stain	—			B+
Glaze Powder	CZR PRESS Glaze Powder			

※ Используйте SS White, либо SB White в случаях, когда нужно замаскировать цвет абатмента или усилить белизну

### ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ EW ДЛЯ КЕРАМИКИ CZR

Категория	Оттенок	Применение
Shade Base	SB White	Для случаев, когда Вам нужно подчеркнуть белизну
Body	EW00B	EW00 имеет наибольшую opakовость. EW0, EW и EWY - соответственно более низкую
	EW0B	
	EWB	
	EWYB	
Enamel	Silky E1	Рекомендуется использовать с EW00 и EW0 Чтобы выразить кальцификацию натуральной эмали Для получения очень яркой отбеленной эмали
	Silky E2	Рекомендуется использовать с EW и EWY
Luster Porcelain	ELT1	Рекомендуется использовать с EW и EWY
	ELT2	Рекомендуется использовать с EW00 и EW0
	ELT3	Для случаев, когда Вам нужно подчеркнуть белизну

### ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ EW ДЛЯ КЕРАМИКИ CZR PRESS

Категория	Оттенок	Применение
Shade Base Stain	SS White	Для случаев, когда Вам нужно подчеркнуть белизну
Ingot EW	EW00	EW00 имеет наибольшую opakовость. EW0, EW и EWY - соответственно более низкую
	EW0	
	EW	
	EWY	

### CZR Clear Cervical & IS Gray

Категория	Оттенок	Применение
Clear Cervical	CCV-1	Для более светлых цветов, таких как A1, A1, A3
	CCV-2	Для более темных цветов, таких как A3,5, A4
	CCV-3	Для создания цвета обнаженного зубного корня
	CCV-4	Более красный, чем CCV-3 Для создания передней язычной ямки
Internal Stain	Gray	Для подгонки оттенка



■ CZR Esthetic White Kit



■ CZR Press Esthetic White Kit



■ CZR Professional Kit

*Noritake*



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japan

Phone +81-561-32-8953 Fax +81-561-32-8976

<http://www.kuraraynoritake.com>

CE 0120